

Anaftin[®] tekućina za ispiranje usta

Anaftin[®] tekućina za ispiranje usta pomaže kontrolirati bol koju uzrokuju manje lezije u ustima poput onih uslijed aftoznog stomatitisa, aftoznih ulkusa (čireva), kao i manje lezije nastale uporabom zubnih aparata ili neprikladnih umjetnih zubala. Indiciran je i za difuzne aftozne ulkuse (čireve).

Način djelovanja:

Anaftin[®] Mouthwash sadrži polivinilpirolidon (PVP) i hijaluronsku kiselinu koji tvore zaštitni sloj koji pranja uz usnu šupljinu kao mehanička barijera prema zahvaćenim područjima te na taj način ublažava bol koja nastaje zbog izloženosti živčanih završetaka. Hijaluronska kiselina i *Aloe vera* u njegovu sastavu pomažu prirodnom zacjeljivanju oštećenog tkiva.

Upute za uporabu:

Napunite dozirnu čašicu do mjerne oznake za 10 ml. Promućkajte u ustima najmanje jednu minutu, pa ispljunite. Primijenite 3 - 4 puta na dan, ili prema potrebi. Za najbolje rezultate izbjegavajte jesti ili piti najmanje sat vremena nakon primjene. U slučaju da nehotice progutate tekućinu, nisu potrebne nikakve dodatne mjere.

Sastojci:

Aqua, polivinilpirolidon (PVP), maltodekstrin, propilen glikol, *Aloe barbadensis*, hidroksietilceluloza, kalijev sorbat, natrijev benzoat, PEG-40 hidrogenizirano ricinusovo ulje, dinatrijev EDTA, benzalkonijev klorid, natrijev hijaluronat, aroma, natrijev saharin, dikalijev glicirizat

Pozor:

Primjena Anaftin[®] tekućine za ispiranje usta kontraindicirana je u osoba s poznatom preosjetljivošću na bilo koji od sastojaka. Trudnice se prije korištenja proizvoda trebaju posavjetovati s liječnikom. Ako često imate ulkuse (čireve) u ustima preporučljivo je potražiti liječnički savjet.

Mjere opreza i upozorenja:

Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti ili ako bočica izgleda oštećeno ili iz nje curi. Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline. Ne zamrzavati.

Sadržaj:

120 ml

Proizvođač:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milano, Italija

 0477

Distributer:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Njemačka

Datum revizije 09/2016

HR / V109353/01

Product:	Anaftin [®] Mouthwash		
Product No.:	V109353/01		
Language:	Croatian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. Pantone 648		
Date:	03.11.16	Melchert	BC 16-3202