



Upute za uporabu

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Anaftin[®] gel

Anaftin[®] gel pomaže kontrolirati bol koju uzrokuju manje lezije u ustima poput onih uslijed aftoznog stomatitisa, aftoznih ulkusa (čireva), kao i manje lezije nastale uporabom zubnih aparata ili neprikladnih umjetnih zubala. Indiciran je i za difuzne aftozne ulkuse (čireve).

Način djelovanja:

Anaftin[®] gel sadrži polivinilpirolidon (PVP) i hijaluronsku kiselinu koji tvore zaštitni sloj koji prijanja uz usnu šupljinu kao mehanička barijera prema zahvaćenim područjima te na taj način ublažava bol koja nastaje zbog izloženosti živčanih završetaka. Hijaluronska kiselina i *Aloe vera* u njegovu sastavu pomažu prirodnom zacjeljivanju oštećenog tkiva.

Upute za uporabu:

Upotrijebite 1 ili 2 kapi gela za prekrivanje cijelog ulkusa (čira) ili lezije u ustima. Izbjegavajte izravni dodir aplikatora s lezijom. Ne dodirujte leziju jezikom najmanje 2 minute da se omogući formiranje zaštitnog sloja. Nakon svake uporabe stavite kapicu. Za najbolje rezultate izbjegavajte jesti ili piti najmanje sat vremena nakon primjene.

Koristite 3 - 4 puta na dan, a prema potrebi i češće.

Sastojci:

Aqua, polivinilpirolidon (PVP), maltodekstrin, propilen glikol, PEG-40 hidrogenizirano ricinusovo ulje, ksantanska guma, kalijev sorbat, natrijev benzoat, natrijev hijaluronat, aroma, benzalkonijev klorid, dinatrijev EDTA, natrijev saharin, dikalijev glicirizat, *Aloe barbadensis*

Pozor:

Svaku tubu Anaftin[®] gela treba koristiti samo jedna osoba da se izbjegne uzajamna kontaminacija aplikatora i gela. Primjena Anaftin[®] gela kontraindicirana je u osoba s poznatom preosjetljivošću na bilo koji od sastojaka. Trudnice se prije korištenja proizvoda trebaju posavjetovati s liječnikom. Ako često imate ulkuse (čireve) u ustima preporučuje se potražiti liječnički savjet.

Mjere opreza i upozorenja:

Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti ili ako tuba izgleda oštećeno ili iz nje curi. Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline. Ne zamrzavati.

Sadržaj:

8 ml

Proizvođač:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milano, Italija

CE 0477

Distributer:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Njemačka

Datum revizije 09/2016

HR / V109345/01



BERLIN-CHEMIE AG 9,5 pt Leaflet

Product:	Anaftin [®] Gel		
Product No.:	V109345/01		
Language:	Croatian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. Pantone 648		
Date:	02.11.16	Melchert	BC 16-3205

Re-proofing

Ready for printing

Signature _____