

Anaftin® Baby gel kod nicanja zubi

Anaftin® Baby gel kod nicanja zubi bioadhezivni je oralni gel. Brzo stvara nevidljivi sloj koji štiti desni od neugode i boli. Njegovi prirodni sastojci pomažu u ublažavanju boli i crvenila u zahvaćenim područjima.

Aplikator ima silikonsku četkicu koja nježno masira desni pružajući olakšanje neugode i simptoma povezanih s nicanjem zubi.



Anaftin® Baby gel kod nicanja zubi ne sadrži lokalne anestetike, lijekove, alkohol ili šećer.

Anaftin® Baby gel kod nicanja zubi ne izaziva osjećaj pečenja prilikom primjene te ima ugodan okus banane.

Upute za uporabu:

Nanesite dovoljno gela da pokrije zahvaćeno područje i aplikatorom nježno izmasirajte desni.

Po mogućnosti primijenite nakon obroka te prije spavanja da se pospješi nastanak zaštitnog sloja i produži učinak ublažavanja boli u djeteta. Koristite koliko god puta je potrebno. Nakon svake uporabe ponovno zatvorite tubu. Uklonite sve ostatke proizvoda koji mogu smetati kod sljedeće primjene gela.

Sastojci:

Aqua, polivinilpirolidon (PVP), maltodekstrin, propilen glikol, PEG-40 hidrogenizirano ricinusovo ulje, *Aloe barbadensis*, ksantanska guma, aroma, kalijev sorbat, natrijev benzoat, dinatrijev EDTA, natrijev hijaluronat, ksilitol, cetilpiridinij klorid, gliciretinska kiselina, *Crocus sativus*

Opresz:

Svaku tubu Anaftin® Baby gela kod nicanja zubi treba koristiti samo jedna jedina osoba da se izbjegne uzajamna kontaminacija aplikatora i gela. Primjena Anaftin® Baby gela kod nicanja zubi kontraindicirana je u osoba s poznatom preosjetljivošću na bilo koji od sastojaka. Trudnice se prije korištenja proizvoda trebaju posavjetovati s liječnikom.


Product:	Anaftin® Baby		
Product No.:	V109342/01		
Language:	Croatian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. P 648	2. P 7466	3. Magenta
Date:	02.11.16	Melchert	BC 16-3196

Mjere opreza i upozorenja:

POZOR:

Proizvod smije nanositi isključivo odrasla osoba.
Ovaj medicinski proizvod nije igračka! NIKADA ga ne ostavljajte u rukama djeteta.
Postoji opasnost od gušenja!
Prije uporabe provjerite ima li na medicinskom proizvodu znakova istrošenosti te vodite računa o tome da se tijekom primjene gela nijedan dio glave aplikatora slučajno ne odvoji. Ako se to dogodi, prestanite ga koristiti.
Nemojte pokušavati ponovno sastaviti odvojeni dio.
Prestanite koristiti proizvod kad se gel potroši.
Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti ili ako tuba ima vidljivo oštećenje ili iz nje curi. Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline.
Ne zamrzavati.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

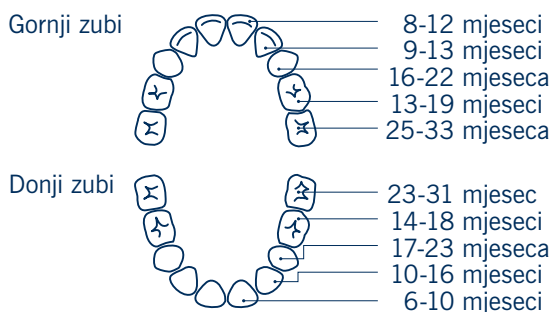

Sadržaj:

10 ml

Proizvođač:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italija



Distributer:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Njemačka

Datum revizije 09/2016

HR / V109342/01

Product:	Anaftin® Baby		
Product No.:	V109342/01		
Language:	Croatian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. P 648	2. P 7466	3. Magenta
Date:	02.11.16	Melchert	BC 16-3196